


## PLYTA CZOŁOWA APARATU

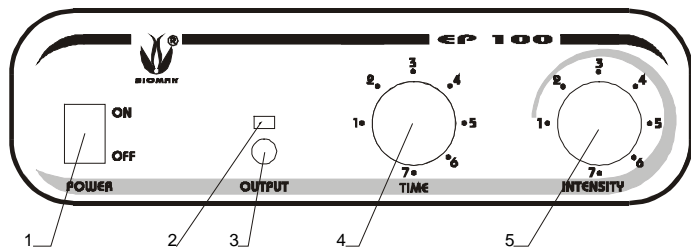

1. Włącznik sieciowy
2. Sygnalizator pracy
3. Gniazdo uchwytu igieł
4. Pokrętko regulacji czasu płynięcia prądu
5. Pokrętko regulacji natężenia prądu

## PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU

1. **Przed zabiegiem skórę oczyścić i zdezynfekować**
2. Włączyć urządzenie przyciskiem **ON/OFF(1)**.
3. Pokrętkiem **INTENSITY(5)** ustawić natężenie prądu odpowiednio do zabiegu i indywidualnej wrażliwości pacjenta, a pokrętkiem **TIME(4)** czas usuwania włosa, czyli czas płynięcia prądu w sekundach.
4. Wprowadzić igłę w kanał włosa i włączyć prąd, poprzez krótkie naciśnięcie na pedał (na gniazdem **OUTPUT(3)** zapali się czerwona dioda(2) sygnalizująca doprowadzenie prądu do igły). Prąd płynie tyle sekund, ile ustawiono pokrętkiem TIME po czym gaśnie dioda(2) i słychać sygnał dźwiękowy.
5. Po wyjęciu igły włos usuwany jest pincetą

**Chcąc przerwać zabieg, trzeba nacisnąć krótko na pedał.**

Czas zabiegu (płynięcia prądu) można dowolnie wydłużyć, trzymając naciśnięty pedał

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby nie dopuścić do uszkodzenia skóry należy:

- Dopasować natężenie i czas przepływu prądu do indywidualnych możliwości klienta.
- Bardzo starannie wprowadzać igłę, w celu uniknięcia powierzchownych oparzeń skóry.
- **Włączać prąd tylko wtedy, gdy igła jest wewnątrz cebulki włosowej.**

Unikać wystawiania na słońce obszaru objętego zabiegiem przez 24 godziny po jego zakończeniu.

## UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia



05-820 Piastów  
ul. Stońskiego 13  
tel/fax (0-22) 723-69-54  
tel.(0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomak@biomak.pl](mailto:biomak@biomak.pl)  
[www.biomak.pl](http://www.biomak.pl)

## EPILATOR EP100

### INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Epilator EP100 (Nr kat 10303) jest urządzeniem służącym do usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem prądu wielkiej częstotliwości. Zastosowana metoda powoduje, iż zabieg jest aseptyczny i mało bolesny, a podczas zamykania naczyń nie dochodzi do krwawienia.



### Dane techniczne:

zasilanie	230V,50Hz
moc pobierana	35W
częstotliwość pracy	2,7MHz
wymiary	220x150x65mm
ciężar	2,2kg

### Wyposażenie :

1. pedał (nr.kat. 00301)
2. uchwyt do mocowania igieł (nr.kat. 00302)
3. igły UNI-PROBE 3szt (nr.kat. 00305) – Sterylne igły w KI I, Jednorazowe do użytku w gabinetach kosmetycznych do epilacji. Kombinacja igły z ostonką.  
Grubości: **2-niebieski** **3-biały** **4-turkusowy** **5-szary** **6-czerwony**
4. imadło do igieł UNI-PROBE (nr.kat. 00305)

### PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 230V, 50Hz z uziemieniem.
2. Wtyczkę pedału włożyć do gniazda na tylnej ścianie aparatu.
3. Wtyczkę uchwytu do mocowania igły włożyć do gniazda **OUTPUT(3)**.
4. Poluzować uchwyt do mocowania igieł odkręcając jego końcówkę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
5. W otwór uchwytu wsunąć trzpień igły.
6. Kończówkę uchwytu dokręcić w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara



EP06

EP06