

PRZYSTĄPIENIE DO ZABIEGU

Zabieg prowadzić na oczyszczonej skórze. Przed rozpoczęciem zabiegu sprawdzić działanie urządzenia na własnej dłoni. Przystawić pelotę do miejsca w którym wykonywany będzie zabieg. Pokrętem stopniowo zwiększać intensywność, indywidualnie dla każdego klienta.

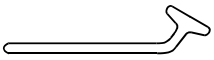
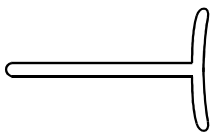
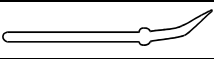
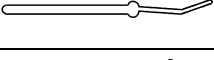
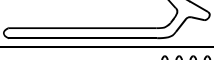
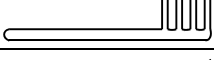
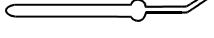
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zabiegu nie stosować na obszarach skóry zwilżonych łatwopalnymi substancjami (alkohol, eter itp.), ponieważ iskry mogą spowodować oparzenia.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

Lista oferowanych pelot

Nr kat.	Typ	Nazwa	Zastosowanie
00501		Grzybek (niebieski)	Do twarzy. Bakteriobójcza.
00502		Łukowa (niebieska)	Szyja, nogi.
00503		Punktowa (niebieska)	Działanie miejscowe
00504		Długa (niebieska)	Okolice małżowin usznych
00505		Grzybek (czerwony)	Do twarzy. Rozgrzewająca.
00506		Grzebień (niebieski)	Skóra głowy.
00509		Z metalowym przepustem (niebieska)	do wypalania

UWAGA! Pelota może wymagać „pobudzenia” w przypadku gdy jest nowa lub długo nie była używana. Pelotę można pobudzić na kilka sposobów:

- rozgrzać przez pocieranie
- rozgrzać pod żarówką

- pocierać o metalowy przedmiot **(NIE POCIERAĆ O OBUDOWĘ APARATU!)**



HF08



05-820 Piastów
ul. Stońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel. (0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

DARSONWAŁ MINI HF09

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Darsonwał HF09 (Nr kat. 10506) ma postać rączki z możliwością mocowania pelot. Jest elektronicznym urządzeniem do masażu i terapii z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Iskrzenie występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą, ma pobudzający wpływ na skórę, na tkanki podskórne i mięśnie, a pośrednio na narządy wewnętrzne. Ozon ma działanie bakteriobójcze. Ładunki elektryczne powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, zwiększają absorpcję substancji leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.



Dane techniczne:

- zasilanie 230V,50Hz
- moc pobierana 20W
- ciężar 0,4kg
- długość rączki 23 cm
- średnica rączki 4 cm

Aparat wyposażony jest standardowo w 1 pelotę – grzybek (Nr kat. 00501).

PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

1. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego 220V,50Hz z uziemieniem.
2. Pelotę wcisnąć do oporu w otwór rączki.
3. Włączyć urządzenie przyciskiem **ON/OFF**.

HF08