

## •UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA APARATU

- Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
- Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Ozon stosować zgodnie z potrzebami

## •KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- **Codziennie** po skończonej pracy **odkręcić kranik spustowy i zlać całkowicie wodę ze zbiornika.**

### Czyszczenie zbiornika:

Jeżeli **w lejku pokazuje się woda, wyczyść zbiornik:**

- rozpuścić 2 łyżki kwasu cytrynowego w litrze wody
- wlać roztwór do zbiornika
- włączyć wapozon
- gdy zacznie parować, wyłączyć i zlać wodę
- przepłukać

**UWAGA! Nie stosować innych środków odkamieniających, mogą one powodować korozję zbiornika i uszczelek.**

Wszelkich zabiegów konserwacyjnych dokonywać tylko **przy wyłączonym z sieci aparacie.** Aparat czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników.



05-820 Piastów  
ul. Słońskiego 13  
tel/fax (0-22) 723-69-54  
tel.(0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomak@biomak.pl](mailto:biomak@biomak.pl)  
[www.biomak.pl](http://www.biomak.pl)

## WAPOZON VP 01

### INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 01 (Nr kat.10101) jest urządzeniem najnowszej generacji, służącym do nawilżania skóry twarzy i ciała. Posiada możliwość stosowania ziół i olejków aromatycznych.



#### **Charakterystyka:**

- mówiący system, informujący o pustym lub pełnym zbiorniku;
- blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepełnionym zbiorniku;
- elektroniczny zegar umożliwiający ustawienie czasu parowania i czasu korzystania z ozonu;
- elektronicznym systemem podtrzymującym temperaturę wody na poziomie 95°C;
- czas nagrzewania pełnego zbiornika wody ok. 12 min.;
- czas parowania pełnego zbiornika ok. 45 min.;
- pojemność ok. 1,2 litra;
- w dyszy wylotowej posiada filcową wkładkę do stosowania olejków;
- w otworze wlewowym - sitko do zastosowania ziół.

#### **Dane techniczne:**

- zasilanie 230V, 50Hz
- długość ramienia 60 cm
- wymiary obudowy 16x20x33 cm
- ciężar 7,7 kg

## ●PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Umocować wapozon na statywie lub stoliku
2. Włączyć wtyczkę do **gniazdka 220V z uziemieniem**.
3. Włączyć przycisk **POWER**.  
Zbiornik jest pusty aparat mówi "**za mało wody**" i miga **żółta dioda**. Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona.
4. Przez otwór znajdujący się w górnej części obudowy włąć **destylowaną** lub **miękką, przegotowaną, odstaną (ok. 12 godzin) wodę**. Wlewać ją do chwili zapalenia się **drugiej zielonej diody** i usłyszenia **krótkiego sygnału dźwiękowego**.
5. Jeżeli zbiornik jest przepelniony aparat mówi "**za dużo wody**" i miga **czerwona dioda**. Grzałka jest wówczas również automatycznie odłączona. Należy odkręcić kranik spustowy (mieszczący się w dolnej części aparatu) i spuścić tyle wody by zgasła czerwona dioda.

**UWAGA!** Korek i sitko używa się tylko przy pracy z ziołami, w innym przypadku stosuje się tylko lejek

## ●USTAWIENIE CZASU PRACY

- Po włączeniu przycisku **POWER** wapozon jest zaprogramowany na 20-to minutowy czas parowania i 5-cio minutowy czas ozonowania. Ozon włącza się automatycznie pod koniec zabiegu.
- Chcąc zmienić podane wartości postępuj wg następującego schematu:  
Np. chcąc ustawić czas parowania na 15 min. i czas ozonowania na 7 min.
  1. Nacisnąć przycisk **STOP**,
  2. Przycisnąć klawisz oznaczony strzałką ▼ i trzymać do chwili ukazania się liczby 15 na wyświetlaczu.
  3. Jednocześnie przycisnąć klawisz **OZON** i klawisz oznaczony ▲ Trzymać do momentu ukazania się cyfry 7.  
**UWAGA!** Do pracy bez ozonu, wcisnąć klawisz OZON i jednocześnie klawisz ze strzałką ▼, aż do chwili ukazania się cyfry 0 na wyświetlaczu.
  4. Po dokonaniu zmian **wcisnąć klawisz START**.
- Migający "minus" oznacza, że woda w zbiorniku jest w trakcie podgrzewania.
- Aby przerwać całkowicie zabieg, wcisnąć przycisk **STOP**
- Klawisz **PAUSE zatrzymuje parowanie do momentu wciśnięcia klawisza START** (aparat pamięta brakujący czas do końca zabiegu).
- Po zakończonym zabiegu wapozon mówi "**dziękuję**".

## ●STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy pracy z olejkami aromatycznymi. Kilkomina kroplami olejku nasącza się filc. Po zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki wkładkę filcową należy wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą z kranu.

**UWAGA!** Olejków aromatycznych nie wolno wlewać do zbiornika!

## ●STOSOWANIE ZIÓŁ

Aby przygotować wapozon do stosowania ziół należy:

1. wyjąć metalowy lejek znajdujący się w otworze wlewowym,
2. włąć wodę (destylowaną lub przegotowaną, odstaną ok. 12 godzin) do zbiornika,
3. włożyć sitko
4. włożyć torebkę z ziołami
5. włożyć korek i **mocno go docisnąć**

Po zakończonym zabiegu wyjąć sitko z ziołami. Spuścić wodę z wapozonu odkręcając kranik spustowy. Przepłukać zbiornik czystą wodą (w tym celu można się posłużyć wodą z kranu -włąć ją przez otwór wlewowy i całkowicie wylać odkręcając kranik spustowy).

Po przepłukaniu zbiornika włożyć lejek w otwór wlewowy i **mocno go docisnąć**.

**UWAGA!** Zioła wolno stosować tylko w torebkach wkładając je na sitko. **Nie wlewać naparu z ziół ani nie wsypywać ich do zbiornika wapozonu**. Nie wlewać wody przez sitko, na którym znajdują się zioła (drobne fragmenty ziół mogłyby się dostać do zbiornika). Chcąc uzupełnić wodę należy wyjąć sitko.

