

## • KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

**Codziennie** po skończonej pracy **odkręcić kranik spustowy i zlać całkowicie wodę ze zbiornika.**

### Czyszczenie zbiornika:

Jeżeli **w lejkę pokazuje się woda, wyczyścić zbiornik:**

- rozpuścić 2 łyżki kwasu cytrynowego w litrze wody
- wlać roztwór do zbiornika
- włączyć wapozon
- gdy zacznie parować wyłączyć i zlać wodę
- przepłukać

**UWAGA! Nie stosować innych środków odkamieniających, mogą one powodować korozję zbiornika i uszczelek.**

Wszelkich zabiegów konserwacyjnych dokonywać tylko przy wyłączonym z sieci aparacie. Aparat czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników.

## • UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA APARATU

- Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
- Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Ozon stosować zgodnie z potrzebami (w modelu VP 200).



VP 100 – VP 200



05-820 Piastów  
ul. Stońskiego 13  
tel./fax: (0-22) 723-69-54  
tel. (0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomak@biomak.pl](mailto:biomak@biomak.pl)  
[www.biomak.pl](http://www.biomak.pl)

## WAPOZON VP 100 (Nr kat. 10111) / VP 100Z (Nr kat. 10114), WAPOZON VP 200 (Nr kat. 10112) / VP 200Z (Nr kat. 10115) INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozony z serii VP są nowoczesnymi urządzeniami do nawilżania skóry z możliwością ozonoterapii i stosowania olejków aromatycznych.



Fot. VP 200

### CHARAKTERYSTYKA:

- elektroniczna sygnalizacja poziomu wody;
- blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepełnionym zbiorniku;
- obrotowe ramię (170°) i dysza (270°);
- funkcja ozonu (dotyczy VP 200)
- czas nagrzewania ok. 12 min;
- czas parowania ok. 45 min;
- pojemność ok. 1,2 litra.

### DANE TECHNICZNE:

- zasilanie 230V, 50Hz;
- długość ramienia 60cm;
- wymiary obudowy 24,5szer. X 16wys. X 21głęb. cm;
- ciężar 5,75kg (VP100)
- ciężar 5,3kg (VP200)

VP 100 – VP200

## • PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Umocować wapozon na statywie lub stoliku.
2. Wapozon włączyć do **gniazdka 220V z uziemieniem**.
3. Włączyć przyciskiem **POWER**.
4. Świecąca się **żółta dioda** informuje o zbyt małej ilości wody w zbiorniku (sygnalizowane jest to krótkim, około 1 sekundowym sygnałem dźwiękowym). Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona.
5. Przez otwór z lejkiem, znajdujący się w górnej części obudowy wlać ok. 1,2 litra **destylowanej lub miękkiej, przegotowanej i odstanej (ok. 12 godzin) wody**. Wlewać ją do chwili zapalenia się **drugiej zielonej diody**.
6. Świecąca się **czerwona dioda** świadczy o przepelnionym zbiorniku (sygnalizowane jest to krótkim, około 1 sekundowym sygnałem dźwiękowym). Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona. Należy odkręcić kranik spustowy (mieszczący się w dolnej części aparatu) i spuszczać wodę do momentu zgaśnięcia czerwonej diody.
7. Po zagrzaniu się wody z dyszy znajdującej się w ramieniu zaczyna uchodzić para. Wapozon jest gotowy do pracy.

## • STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy pracy z olejkami aromatycznymi. Kilka kropli olejku nasącza się filc. Po zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki wkładkę filcową należy wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą.

**UWAGA!** Olejków aromatycznych nie wolno wlewać do zbiornika!

## • STOSOWANIE OZONU dotyczy - VP 200 (Nr kat. 10112)

Aby włączyć ozon należy wcisnąć przycisk OZONE. Aby wyłączyć funkcję ozonu, należy ponownie wcisnąć przycisk OZONE.

**UWAGA!** Włącznik **OZONE** działa tylko wtedy, gdy w aparacie jest odpowiednia ilość wody (sygnalizowane jest to świeceniem się jednej lub dwóch **zielonych diod**).

## • STOSOWANIE ZIOŁ dotyczy - VP 100Z (Nr kat. 10114), VP 200Z (Nr kat. 10115)

Aby przygotować wapozon do stosowania ziół należy:

1. wyjąć metalowy lejek znajdujący się w otworze wlewowym,
2. wlać wodę (destylowaną lub przegotowaną, odstana ok. 12 godzin) do zbiornika,
3. włożyć sitko
4. włożyć torebkę z ziołami
5. włożyć korek i **mocno go docisnąć**.

Po zakończonym zabiegu wyjąć sitko z ziołami. Spuścić wodę z wapozonu odkręcając kranik spustowy. Przepłukać zbiornik czystą wodą (w tym celu można się posłużyć wodą z kranu -wlać ją przez otwór wlewowy i całkowicie wylać odkręcając kranik spustowy).

Po przepłukaniu zbiornika włożyć lejek w otwór wlewowy i **mocno go docisnąć**.

**UWAGA!** Zioła wolno stosować tylko w torebkach wkładając je na sitko. Nie wolno wlewać naparu z ziół ani wsypywać ich do zbiornika wapozonu. Nie wlewać wody przez sitko, na którym znajdują się zioła (drobne fragmenty ziół mogłyby się dostać do zbiornika). Chcąc uzupełnić wodę wyjąć sitko.

**UWAGA!** Korek i sitko używać tylko przy pracy z ziołami, w innym przypadku stosować tylko lejek.