

• UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA APARATU

- Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
- Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Ozon stosować zgodnie z potrzebami

• KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- **Codziennie po skończonej pracy odkręcić kranik spustowy i zlać całkowicie wodę ze zbiornika.**

Czyszczenie zbiornika:

Jeżeli **na wyświetlaczu pojawi się komunikat „odkamienić zbiornik”** należy:

- rozpuścić 2 łyżki kwasu cytrynowego w litrze wody
- wlać roztwór do zbiornika
- włączyć wapozon
- gdy zacznie parować po 10 minutach wyłączyć i zlać wodę
- przepłukać

UWAGA! Nie stosować innych środków odkamieniających, mogą one powodować korozję zbiornika i uszczelek.

Wszelkich zabiegów konserwacyjnych dokonywać tylko **przy wyłączonym z sieci aparacie**. Aparat czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników.



05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel./fax: (0-22) 723-69-54
tel. (0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

WAPOZON VP 300 / VP 300Z

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 300 (Nr kat. 10113) jest urządzeniem służącym do nawilżania skóry twarzy i ciała oraz ozonoterapii. Posiada możliwość stosowania olejków aromatycznych i ziół (VP 300 Z - nr kat. 10116).

Charakterystyka:

- wyświetlacz LCD;
- sterowanie mikroprocesorem;
- komunikaty w języku polskim;
- blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepelnionym zbiorniku;
- elektroniczny zegar umożliwiający ustawienie czasu parowania i czasu korzystania z ozonu;
- elektroniczny system podtrzymujący temperaturę wody na poziomie 95°C;
- gotowość do pracy ok. 1 min.;
- czas parowania pełnego zbiornika ok. 45 min.;
- pojemność ok. 1,2 litra;
- w dyszy wylotowej posiada filcową wkładkę do stosowania olejków;

Dane techniczne:

- zasilanie 230V, 50Hz
- moc pobierana 600 W
- długość ramienia 60 cm
- wymiary obudowy 245x210x160mm
- ciężar 5,9 kg



● PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Umocować wapozon na statywie lub stoliku.
2. Włączyć wtyczkę do **gniazdka 220V z uziemieniem**.
3. Włączyć przycisk **POWER**. Na ekranie pokaże się napis ***BIOMAK***, następnie **VP300** i kolejno

P 20m O 05m

P 20m - oznacza czas parowania
O 05m - oznacza czas działania ozonu
Gdy zbiornik jest pusty na ekranie pojawi się komunikat **dolej wody**, miga **żółta dioda** i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona.
4. Przez otwór znajdujący się w górnej części obudowy włączyć **destylowaną** lub **miękką, przegotowaną, odstaną (ok. 12 godzin) wodę**. Wlewać ją do chwili zapalenia się **drugiej zielonej diody**.
5. Jeżeli zbiornik jest przepelniony pokaże się napis **za dużo wody** miga **czerwona dioda** i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona. Należy odkręcić kranik spustowy (mieszczący się w dolnej części aparatu) i spuszczać wodę do momentu zgaśnięcia czerwonej diody.

● USTAWIENIE CZASU PRACY

1. Czas parowania ustawić klawiszami ▼ i ▲. Aby zmienić czas pracy ozonu należy nacisnąć i trzymać klawisz **STOP/OZONE** a klawiszami ▼ i ▲ ustawić żądany czas. **Ozon włącza się pod koniec parowania wody i wyłącza się razem z parowaniem wody**.
2. Aby rozpocząć zabieg należy nacisnąć klawisz **START/PAUSE**. Od momentu pojawienia się pary zacznie się odliczanie czasu.
3. Aby przerwać zabieg należy nacisnąć klawisz **STOP/OZONE**. Na ekranie pojawią się poprzednio ustawione czasy pracy.
4. Aby przerwać zabieg na chwilę należy nacisnąć klawisz **START/PAUSE**. Migają wtedy cyfry czasów.
5. Co kilkanaście godzin użytkowania pojawi się napis **odkamienić zbiornik** (patrz 'konserwacja i czyszczenie').

● STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy pracy z olejkami aromatycznymi. Kilkom kroplami olejku nasącza się filc. Po zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki wkładkę filcową należy wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą z kranu.

UWAGA! Olejków aromatycznych nie wolno wlewać do zbiornika!

● STOSOWANIE OZONU

Aby włączyć ozon należy wcisnąć przycisk **OZONE**. Aby wyłączyć funkcję ozonu, należy ponownie wcisnąć przycisk **OZONE**.

UWAGA! Włącznik **OZONE** działa tylko wtedy, gdy w aparacie jest odpowiednia ilość wody (sygnalizowane jest to świeceniem się jednej lub dwóch **zielonych diod**).

● STOSOWANIE ZIÓŁ dotyczy - VP 300Z (Nr kat. 10116),

Aby przygotować wapozon do stosowania ziół należy:

1. wyjąć metalowy lejek znajdujący się w otworze wlewowym,
2. włączyć wodę (destylowaną lub przegotowaną, odstanną ok. 12 godzin) do zbiornika,
3. włożyć sitko
4. włożyć torebkę z ziołami
5. włożyć korek i **mocno go docisnąć**.

Po zakończonym zabiegu wyjąć sitko z ziołami. Spuścić wodę z wapozonu odkręcając kranik spustowy. Przepłukać zbiornik czystą wodą (w tym celu można się posłużyć wodą z kranu -włączyć ją przez otwór wlewowy i całkowicie wyłączyć odkręcając kranik spustowy).

Po przepłukaniu zbiornika włożyć lejek w otwór wlewowy i **mocno go docisnąć**.

UWAGA! Zioła wolno stosować tylko w torebkach wkładając je na sitko. Nie wolno wlewać naparu z ziół ani wsypywać ich do zbiornika wapozonu. Nie wlewać wody przez sitko, na którym znajdują się zioła (drobne fragmenty ziół mogłyby się dostać do zbiornika). Chcąc uzupełnić wodę wyjąć sitko.

UWAGA! Korek i sitko używać tylko przy pracy z ziołami, w innym przypadku stosować tylko lejek.