



05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel. (0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

WOSKOWNICA WH02D

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Woskownica WH 02D (Nr kat.10904) jest urządzeniem do depilacji przy użyciu płynnego wosku. Otwór w obudowie umożliwia podgrzewanie wosku w puszkach o wymiarach standardowych - ogólnie dostępnych w handlu.



Dane techniczne:

- zasilanie230V;50Hz
- moc pobierana 150 W
- zakres regulacji temperatury60÷90°C
- ciężar..... ok.1,5 kg

UWAGA !!! WYSOKA TEMPERATURA! UTRZYMYWAĆ Z DALA OD ŚCIAN I MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.



PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

- włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego z uziemieniem;
- włączyć zasilanie przyciskiem **ON/OFF**;
- do woskownicy wstawić otwarty pojemnik z woskiem;

UWAGA! Do komory, w którą wstawiany jest pojemnik z woskiem nie wlewać wody ani wosku!

- ustawić temperaturę ok. 75°C;
- odczekać ok. 50 min., aż wosk osiągnie odpowiednią temperaturę oraz konsystencję ciekłego miodu;
- w trakcie rozgrzewania wosk mieszać szpatułką, aby temperatura w całym pojemniku była jednakowa;
- prawidłowo rozgrzany wosk nie powoduje uczucia ciągnięcia włosów - daje się łatwo rozprowadzać;

Uwaga: Aparat jest energooszczędny. Grzałka włączana jest, gdy temperatura w komorze jest niższa, niż żądana (ustawiona przy pomocy pokrętki). Wówczas zielona kontrolka nie świeci się.

Gdy aparat jest gotowy do pracy świeci się zielona kontrolka (READY).

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU

- Przed depilacją, odtłuścić i zdezynfekować skórę.
- Włosy powinny mieć długość ok. 5 – 10 mm.
- Wosk nakładać na skórę szpatułką pojedynczym pociągnięciem w kierunku „z włosem”. Powierzchnia nakładanego wosku nie może być szersza od paska.
- Przyłożyć pasek ściągacza i docisnąć go przesuwając dłonią 2-3 razy w tym samym kierunku.
- Chwycić pasek za krawędź i energicznym ruchem równoległym do powierzchni ciała, oderwać go w kierunku „pod włos”.
- Po zabiegu resztki wosku usunąć z ciała preparatem zmywającym wosk lub oliwką.
- Przez okres 12 godzin po zabiegu (głównie na twarzy) nie stosować perfum, ani makijażu.
- Skórę po depilacji chronić przed działaniem promieni słonecznych co najmniej przez dobę.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie dopuszcza się woskowania w przypadku ciąży, stanów zapalnych skóry, opuchlizny i innych schorzeń skóry.

KONSERWACJA

- Zabiegów konserwacyjnych dokonywać przy wyłączonym aparacie z sieci.
- Aparat wymaga okresowego czyszczenia obudowy miękką szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Miejsca zabrudzone woskiem czyścić watką zwilżoną w oliwce od razu po powstaniu zanieczyszczenia. Do czyszczenia obudowy nie stosować rozpuszczalników.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe ze stosowania wosków innych niż polecane przez firmę **BIOMAK.**