



BIOMAK

05-820 Piastów
ul. Słońskiego 13
tel/fax (0-22) 723-69-54
tel.(0-22) 723-70-72
e-mail: biomak@biomak.pl
www.biomak.pl

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

BIOSONIC BS200


Nowoczesny w swoim wyglądzie i rozwiązaniach technologicznych aparat do odmładzania skóry metodą peelingu kawitacyjnego i sonoforezy. Efektem zabiegu tym aparatem jest skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy skóry, a co za tym idzie lepsze wchłanianie preparatów. Rezultatem zabiegu jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku skóra.

Sonoforeza połączona z mikromasażem wzmacnia efekt liftingu, napięcie, nawilżenie, dotlenienie, redukcję zmarszczek i odżywienie skóry twarzy.



BIOSONIC BS 200
nr kat. 12006

WIDOK APARATU

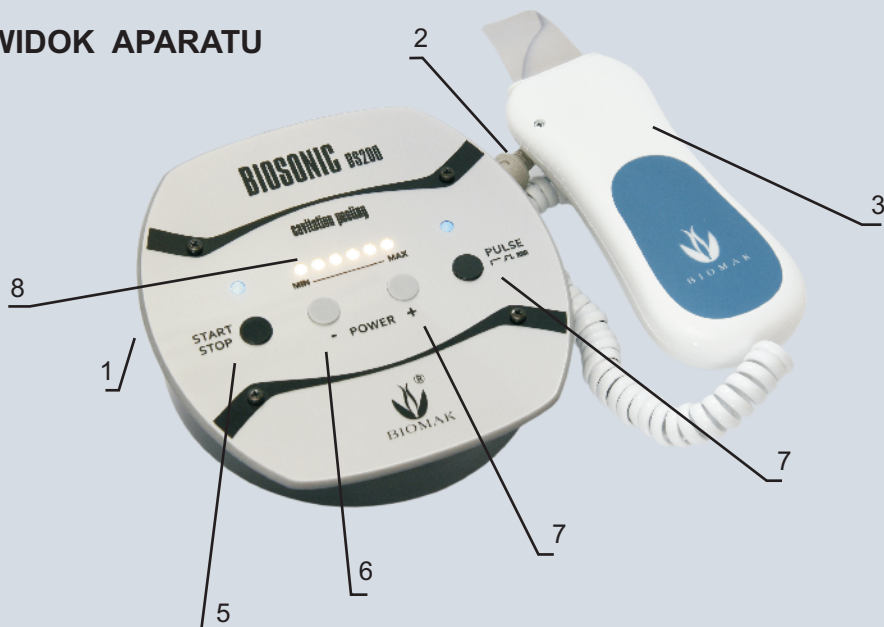

1. Włącznik sieciowy
2. Gniazdo głowicy
3. Głowica
4. Przycisk START / STOP oraz dioda niebieska sygnalizująca czy uruchomiona jest praca aparatu
5. Przycisk pracy pulsacyjnej oraz dioda niebieska sygnalizująca
Dioda zgaszona praca ciągła, dioda miga - praca pulsacyjna,
dioda miga szybko praca pulsacyjna szybka
6. Przycisk Power (moc) -
7. Przycisk Power (moc) +
8. Białe diody sygnalizujące poziom mocy pracy głowicy

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: 230V; 50Hz
- Moc pobierana 40 W
- Wymiary 150 x 145 x 50mm
- Ciężar ~1,0 kg
- Częstotliwość ultradźwięków 23kHz +/- 1kHz
- Max. natężenie ultradźwięków 0,5W/cm²

Wypożyczenie:

- aparat Biosonic BS 200
- głowica do peelingu kawitacyjnego
- instrukcja obsługi


FUNKCJE

- peeling - oczyszczanie
- sonoforeza - wprowadzanie preparatów ultradźwiękami
- "prasowanie" zmarszczek, mikromasaż, lifting

PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

1. włożyć wtyczkę kabla do gniazda sieciowego 230V,50Hz.
2. wtyczkę głowicy roboczej (3) włożyć do gniazda (2)
3. włączyć urządzenie przyciskiem O/I (1)
4. na pulpicie Biosonica zaświeci/cą się białe diody poziomu mocy. Ile diod się zapali zależy jaką mieliśmy ustawioną moc przy ostatniej pracy aparatem.

USTAWIENIE MOCY BIOSONICA

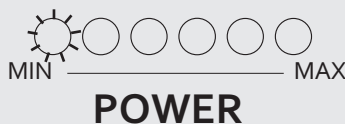

Moc pracy głowicy Biosonica możesz regulować przez zabiegiem lub w trakcie zabiegu. Naciskając przycisk Power + lub - regulujemy zapalając diody białe MOC.

WSKAZANIE DO STOSOWANIA:

- oczyszczanie skóry
- usuwanie martwego naskórka
- trądzik
- skóra dojrzała, pozbawiona jędrności
- skóra odwodniona, zmęczona
- ogólna poprawa estetyki skóry

PRZYKŁADOWY ZABIEG OCZYSZCZANIA (PEELING KAWIATACYJNY)

Przygotuj aparat do pracy zgodnie z powyższym opisem patrz str.3.


- usuń biżuterię z osoby , która poddana jest zabiegowi (kolczyki, łańcuszki)
- zmyj skórę twarzy, oczu i szyi z resztek makijażu, przy pomocy wacika nasączonego tonikiem bezalkoholowym,
- przy użyciu toniku do kawitacji lub soli fizjologicznej, nasącz skórę i rozpocznij zabieg.

Głowicę płaską, prowadź delikatnymi muśnięciami po ciele w kierunku od siebie (patrz rys.1). Nie przyciskaj do skóry, aby jej nie podrapać i nie wygiąć metalowej części głowicy.

Sposób użycia i kierunek ruchu głowicy



rys.1

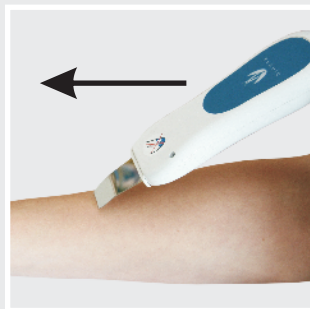

- Oderwać głowicę i przenieść ją w nowe, zwilżone miejsce. Nie zatrzymywać jej w bezruchu, gdyż można poparzyć skórę.

- Prawidłowa kawitacja jest wtedy, gdy spod głowicy wydostaje się mgiełka cieczy.
- Pamiętaj, aby skóra podczas całego zabiegu była stale mokra.
- Cały zabieg nie powinien przekraczać 10 minut.
- Nadmiar zgromadzonej substancji na metalowej części głowicy, w trakcie zabiegu – usuwać wacikiem.
- Peeling kawitacyjny wykonujemy co 4-5 tygodni.


Głowicy nie wolno moczyć w żadnej cieczy, gdyż grozi to jej uszkodzeniem.



Włączając podczas zabiegu impulsowanie, mamy PEELING PULSACYJNY. Pozwala on uzyskać lepszy i szybszy efekt złuszczenia naskórka.

Po zakończeniu tej fazy zabiegu, skóra może być przez kilka minut zaczerwieniona.

Na tak przygotowaną skórę można wykonać drugą fazę zabiegu – SONOFOREZĘ (patrz zabieg sonoforeza na twarz)

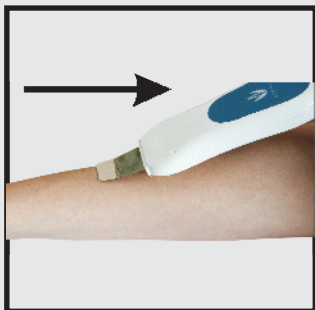

SONOFOREZA – wprowadzanie, czas trwania zabiegu ok. 5 minut. Zabieg prowadzimy szerszą stroną głowicy, tak jak pokazano na zdjęciu. Należy nałożyć preparat (żel do ultradźwięków lub preparat przeznaczony do ultradźwięków) na skórę poddawaną zabiegowi. Przesuwać głowicę pasmami, na odcinku około 5 cm, lub małymi nakładającymi się kółeczkami, podnieść

głowicę. Przenieść na kolejną partię skóry, znów oderwać, itd. **Przy zwilżaniu skóry, dokładaniu na skórę kosmetyku, preparatu należy urządzenie wyłączyć przyciskiem START/STOP.**

Sonoforeza + mikromasaż (lifting- prasowanie zmarszczek) – jest to funkcja, którą możemy włączyć, aby wzmocnić lifting. Mikromasaż włączamy przyciskiem PULSE, mamy tu do wyboru trzy tryby pracy: praca ciągła (sonoforeza) i dwa tryby pracy pulsacyjnej (mikromasaż) – szybszy i wolniejszy – należy wybrać, stosownie do odczuć, odpowiedniejszy dla siebie. Nie należy stosować mikromasażu (pracy pulsacyjnej) na skórze poniżej 25 r.ż. - ponieważ jest to niepotrzebna w tym wieku stymulacja skóry. **Przytrzymanie głowicy w jednym miejscu na skórze – może spowodować oparzenie.**

Sonoforezę i sonoforezę z mikromasażem najlepiej jest wykonywać w serii. Seria to 5 do 10 zabiegów, co 48h. Nie częściej. Nie rzadziej niż raz w tygodniu. Między seriami powinno być 2-3 miesiące przerwy.

Wybrać odpowiedni preparat do ultradźwięków od 1 do 19 z serii Professional Line Biomak.

Należy pamiętać, że przy sonoforezie – wprowadzaniu ultradźwiękami – w skórę do ok. 1 cm – wprowadzamy wszystkie substancje zawarte w kosmetyku, więc preparat musi być przeznaczony do ultradźwięków, mieć mało konserwantów, względnie delikatne. Standardowe kosmetyki mają za zadanie działać powierzchownie, wprowadzenie ich wgłąb skóry może zamiast pomóc – zaszkodzić.

UWAGI OGÓLNE PRZY ZABIEGACH

Niektóre osoby mogą słyszeć „piszczenie” urządzenia podczas pracy – jest to związane z zakresem słuchu danej osoby. Dźwięk może być szczególnie słyszalny w okolicach kości głowy (szczeka, kości policzkowe, czoło) i uszu.

W trakcie zabiegu odczuwane jest ciepło – jest to naturalna, pożądana reakcja. Metalowa część rozgrzewa się przez działającą falę ultradźwiękową. Wytwarzane ciepło powoduje m.in. lepsze wchłanianie się kosmetyków w skórę.

Po zabiegu skóra może być zaczerwieniona od kilku minut do kilku godzin (jest to efekt lepszego ukrwienia i dotlenienia skóry). Nie należy

po zabiegu wystawiać twarz na działanie promieni UV.

Po zakończonym zabiegu urządzenie pozostawić w suchym miejscu, zabezpieczyć przed upadkiem.

UWAGA!

MUSISZ TO WIEDZIEĆ *zanim przystąpisz do zabiegu:*

Nie moczyć głowicy - w celu dezynfekcji należy przetrzeć metalową część, płynem dezynfekującym lub spirytusem dostępnym w aptece. Moczenie głowicy powoduje jej trwałe uszkodzenie. Po zakończonym zabiegu metalową część głowicy wytrzeć, tak by usunąć resztki płynu/cieczy/preparatu z powierzchni.

Aparat samoistnie wyłącza się po około 3 minutach pracy (gaśnie dioda START/STOP)– jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy. Aby ponownie uruchomić aparat, należy odczekać około 1 minutę i wcisnąć przycisk START/STOP. **Przy prawidłowej pracy nie dopuszcza się aby aparat wyłączał się sam. Przy zwilżaniu skóry, dokładaniu na skórę kosmetyku, preparatu należy urządzenie wyłączyć przyciskiem START/STOP.**

Niekorzystna dla aparatu jest praca „w powietrzu” - czyli kiedy aparat jest włączony a nie ma kontaktu ze skórą. Dlatego należy prowadzić jak najdłuższe pasma głowicą, dotykając skóry. Natomiast przerwy kiedy głowica jest oderwana od skóry mają być krótkie.

Nie trzymać włączonego urządzenia w przerwach podczas zabiegu. Jeśli nie używasz urządzenia – np. dokładasz na skórę preparat – wyłącz je przyciskiem START/STOP – nie świeci się dioda.

Nie trzymać głowicy zbyt długo w jednym miejscu przy skórze – może to doprowadzić do oparzenia.

Nie dociskać mocno szpatuły(głowicy) do skóry – nie będzie kawitacji, ponadto można uszkodzić głowicę.

UWAGA!

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- ciąża
- nowotwór skóry
- poważne alergie skórne
- rozrusznik serca
- nie wykonywać zabiegu blisko oczu (należy wykonywać go około 1 cm od dolnej powieki i powyżej górnej powieki – NIGDY na powiece)
- jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do schorzeń – skontaktuj się z lekarzem

KONSERWACJA

Obudowę aparatu czyścić lekko zwilżoną, miękką szmatką bez użycia środków silnie czyszczących (żrących).

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta celem przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.



BIOMAK

BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. Słońskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54,
e-mail: biomak@biomak.pl www.biomak.pl